

保護者のみなさまへ

メガネはレンズを使う「光学製品」です。

お客様のメガネは、カメラや双眼鏡と同じ光学製品です。カメラや双眼鏡を扱うときは、だれでも指紋やキズなどが付かないよう慎重に扱います。

しかしメガネは、ホコリ、指紋、顔のあぶらなどでレンズが汚れると、ハンカチやタオルで強くこする人がよくいます。このように扱うと、簡単にキズがついてしまいます。また、扱い方を間違うと目に悪い影響を与えたり、ケガをすることもあります。


メガネを気持ちよく使うためには、カメラや双眼鏡と同じようにやさしく取り扱ってください。

プラスチックレンズの特徴を覚えておいてください。

【プラスチックレンズの構造】

最近のメガネに使われることが多いプラスチックレンズは、主に3層構造からなっています。一番外側のコート膜の強度は強化されていますが、下記の弱点があるため、お取り扱いには十分ご注意ください。

プラスチックレンズ断面図

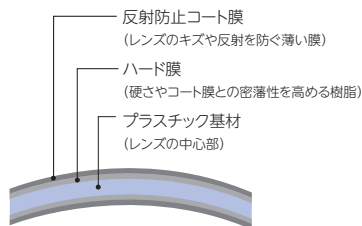

【プラスチックレンズの弱点】

① キズに弱い

ガラスレンズに比べて素材が柔らかいため、やさしく扱わないと簡単にキズがついてしまいます。

② 高熱に弱い

温度が60℃以上になると、素材が急激に膨張し、コート膜が破壊されて、ヒビ割れが生じてしまいます。

③ 塩分やアルカリ成分に弱い

コート膜は、塩分（汗や海水）やアルカリ成分（石けんや洗剤）が浸透すると、早く劣化してしまいます。

⚠ 注意

- すべての眼鏡レンズと同様に、新しいレンズに慣れるまでは視界に違和感を感じる事があります。通常は1週間程度で慣れますが、もし使用に慣れないようであれば眼科医にご相談下さい。
- 眼鏡の効果を正しく保ち、快適にご使用いただくためにも、6ヶ月に1度は眼科医の診察を受けられることをおすすめします。

メガネレンズ ただ あつか かつ せつめいしよ 正しい扱い方説明書


ステレスト® か あ をお買い上げいただき、ありがとうございました。
メガネをかけるとき、はずしたときに守まもっていただきたい大切たいせつな
ことかが書かれています。しよっかり読よんで、安全あんぜんにお使つかいください。

メガネをかけるときの注意 ちゆうい

たいせつ め まも 大切な目を守るため、かならず守まもってください。



やきゆう サッカーや野球などのはげしいスポーツをする
ときはかならず、メガネの上うえに保護用ほごようゴーグル
をかけましょう。

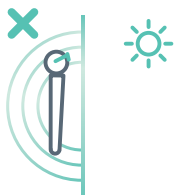

たいよう つよ ひかり ちよくせつみ 太陽や強い光を直接見ないようにしましょう。



てっぱんや 鉄板焼きやバーベキューなど、熱い食べ物あつ た もの やを焼
いているところに、顔かおを近ちかづけないようにしましょう。



- プラスチックレンズといえども、強い衝撃を受けると割れてしまいます。破片でケガや失明をする場合がありますので、はげしいスポーツをする場合には、かならず保護具(ゴーグルなど)を併用させてください。
- お子さまがメガネに慣れるまでは、安全のため自転車のご利用をお控えください。

メガネをはずしたときの注意

ただ あつ かた かた
正しい扱い方、レンズのふき方をおぼえましょう。



まわりにはレンズに危険な60℃以上の場所がいっぱい。熱いところに近づいたり、メガネを置いたりしないでください。



メガネを置くときは、レンズを上に向けて置いてください。



レンズが雨や水にぬれたら、すぐにふきとってください。



クルマからおりるときは車内に置かず、かならず持ってきましょう。



レンズをふくときはサンドイッチをつまむぐらいの力で、やさしくふいてください。

注意 保護者のみなさまへ

- レンズの汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で軽く洗い、水でよくすすいで、すぐにふき取ってください。
【注意】アルカリ系の洗剤(石けん、ソープ類等)はコート膜を劣化させ、膜はがれの原因となりますので、使用しないでください。
- レンズに、カビ取り剤、洗剤、薬剤、有機溶剤、化粧品、油、汗、果汁などが付着した場合は、すぐに水洗いして、ふきとってください。そのままにしておくと、レンズにシミが残ったり、コート膜がはがれることがあります。
- 度数が合わなくなったレンズや、コート膜がキズついたり、ヒビ割れしたレンズは、視力が低下したり、見えにくくなります。危険ですので、使用させないでください。
- 洗えば、かえってコート膜をいためます。つけ置き洗浄剤などは時間をきちんと守って使ってください。



よご おとな ひと ほごしゃ
レンズがひどく汚れたときは、大人の(保護者)に
あら
洗ってもらいましょう。



りょうて
メガネのかけはずしは、両手でしましょう。



も ばあい
持ちはこぶ場合には、
い
メガネケースに入れてください。



かたち お ばあい
形がくずれたり、ずり落ちる場合は、
はや てん ちょうせい
早めにメガネ店で調整してもらいましょう。

ご購入レンズの情報は、ユーザーカードをご参照ください。

【アイコンの説明】

警告 取扱いを誤った場合に、失明や重傷を負う可能性があります。

注意 取扱いを誤った場合に、けがや物的損傷を負う可能性があります。

販売店さまへのお願い

ステレスト®をお求めのお客様には、
十分な使用説明をしていただくと同時に、
この説明サイトを必ずご案内ください。
お客様のレンズ情報が掲載された
ユーザーカードを必ずお渡しください



株式会社 ニコン・エシロール

〒130-0026

東京都墨田区両国 2-10-8 (住友不動産両国ビル)
電話 0570-025-230

…… 製品に関するお問い合わせは下記へ ……

株式会社ニコン・エシロールお客様相談室
午前 10 時～午後 5 時 (土、日曜と祝日を除く毎日)
TEL 0570-025-230 FAX 03-5600-3525

作成年月2025年5月